


# Návod k obsluze přístroje PNEUVEN KOSMETIK VACU

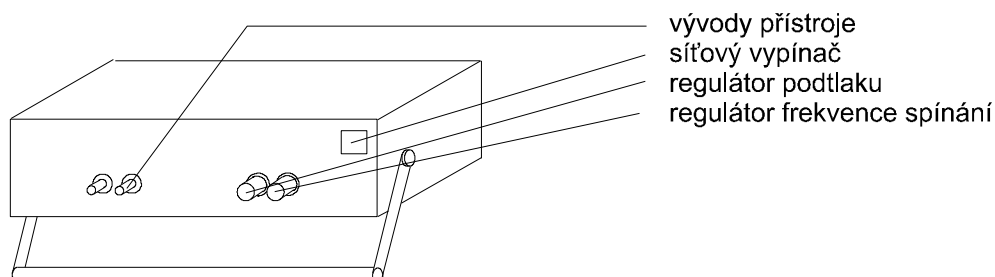

## A/ Účel:

PNEUVEN Kosmetik je přístroj určený pro kosmetickou vakuovou masáž. K přístroji se připojují dvě hadičky zakončené skleněnými aplikátory (baňkami), ve kterých přístroj po přiložení na pokožku, řízeným způsobem vytváří podtlak a opět je zavzdušňuje. Přístroj může pracovat též v režimu, kdy vytváří podtlak trvale. K přístroji je pak připojena pouze jedna hadička se speciálním skleněným aplikátorem a přerušování podtlaku se provádí ručně uvolňováním otvoru na aplikátoru. Druhý vývod přístroje je v tomto případě zaslepen.

## B/ Základní technické parametry

síťové napětí	230 V / 50 Hz
příkon	50 VA
čerpací výkon	0,6 l/s
podtlak vzduchu	max. 0 kPa
hmotnost	4,8 kg
rozměry	390 x 300 x 100 mm

## C/ Obsluha přístroje:

### 1. Umístění a připojení přístroje

Přístroj je určen pro práci v interiéru s teplotami 0-35°C. Nesmí být vystaven účinkům silných zdrojů rušení.

Přístroj umístíme na rovnou plochu. Síťovou šňůru zapojíme nejprve do přístroje a teprve potom do síťové zásuvky s napětím 230V/50Hz (síťový rozvod musí splňovat příslušnou normu ČSN).

Sít'ová šňůra nesmí být mechanicky poškozená. Pokud by došlo k vážnějšímu poškození přístroje (pád z výšky, zatopení vodou atp.) je nutné přístroj nepřipojovat a nechat ho přezkoušet v příslušném servisu nebo u výrobce.

## **2. Připojení hadiček**

Hadičky zasuneme kovovými koncovkami do vývodů přístroje v libovolném pořadí. Na opačné konce hadiček, zakončené silikonovými koncovkami, se nasazují zvolené skleněné aplikátory (baňky) dle účelu použití. V případě použití jedné hadičky se druhý vývod zaslepí zasunutím zásepky.

**Hadičky uvolníme z přístroje** mírným zatlačením modrého kroužku vývodu přístroje dvěma prsty jedné ruky a vytažením hadičky druhou rukou.

### ***POZOR !***

*Je nutné zabránit tomu, aby se látky používané k ošetření pokožky při masáži (např. olej) dostaly přívodními hadičkami do přístroje, kde mohou způsobit poškození.*

*V případě aplikace takovýchto látek doporučujeme používat přívodní hadičky s odlučovačem, který při včasné čišťení a údržbě zabrání přímému vniknutí těchto látek do přístroje a omezí možnost jeho poškození.*

## **3. Zapnutí přístroje**

Přepneme „**Sít'ový vypínač**“ z polohy „**○**“ do polohy „**|**“. Osvětlení vypínače signalizuje, že přístroj je zapnut a pracuje.

## **4. Nastavení podtlaku**

Knoflík „**PODTLAK**“ nastavíme do polohy odpovídající potřebné úrovni podtlaku při práci s přístrojem.

## **5. Nastavení frekvence**

Otáčením knoflíku „**FREKVENCE**“ nastavíme potřebnou frekvenci vytváření podtlaku v aplikátorech (baňkách) a jeho přerušování. Úroveň frekvence je opticky znázorněna blikající kontrolkou žluté barvy. Stav vytváření podtlaku je signalizován zhasnutím kontrolky. Po dobu zavzdušňování kontrolka svítí.

## **6. Nastavení režimu trvalého podtlaku**

Knoflík „**FREKVENCE**“ otočíme do pravé krajní polohy a přístroj zapneme. Režim trvalého podtlaku lze nastavit i za chodu přístroje, pokud knoflík „**FREKVENCE**“ otočíme do pravé krajní polohy v okamžiku, kdy žlutá kontrolka nesvítí. Režim zrušíme otáčením knoflíku „**FREKVENCE**“ doleva.

## **7. Ukončení procedury**

Kdykoliv se rozhodneme ukončit proceduru přepneme „*Sítový vypínač*“ z polohy „|“ do polohy „○“.

## **8. Údržba přístroje a příslušenství**

Přístroj nevyžaduje speciální údržbu. V případě znečištění ho otřeme vlhkým hadrem ( přístroj musí být při údržbě odpojen od sítě ).

Hadičky a skleněné aplikátory (baňky) čistíme běžnými odmašťovacími prostředky. Potom je opláchneme vodou a vysušíme nebo necháme oschnout.

## **9. Důležité upozornění**

Pokud dojde v průběhu používání přístroje k výpadku elektrické energie lze v případě potřeby uvolnit skleněné aplikátory (baňky) od kůže odpojením hadiček od vývodů přístroje.

## **UPOZORNĚNÍ**

Po ukončení životnosti přístroje nevznikají odpady kategorie „nebezpečné“. Samotný přístroj předejte sběrně druhotných surovin jako kovový odpad. Hadičky se skleněnými aplikátory (baňkami) lze považovat za komunální odpad.